

AMPRENTA ANALĂ

Scopul testului

- Amprenta anală este cea mai eficientă metodă de depistare a ouălor de *Enterobius vermicularis*

Pregătire pacient

- Recoltarea se face dimineața, înainte de efectuarea toaletei perineale sau a defecării.

Etape de lucru

- Se ia o banda adezivă (scotch) și o lamă curată;
- Se apropie banda adezivă de zona perianală a pacientului (în jurul anusului);
- Se presează ușor mucoasa astfel încât eventualele ouă din pliurile anale să fie desprinse și să adere la banda adezivă;
- Se atașează banda adezivă de lamă, asigurându-ne că zona amprentată este bine întinsă pe lamă, evitând formarea bulelor de aer;
- Se notează datele de identificare ale pacientului în zona destinată acestui lucru, în capătul lamei, și se împachetează.

