

Instrucțiuni de recoltare – Test Panorama

Proba poate fi recoltată de la 9 săptămâni de sarcină (calculate de la data ultimei menstruații sau de la data transferului de embrion – în cazul FIV).

Probele pentru testul Panorama se recoltează de luni până miercuri.

Recoltarea se va face în baza unei programări prealabile, iar kitul necesar recoltării va fi solicitat de la Cluj (pentru Brașov, Sibiu, Oradea, Baia Mare, Târgu Mureș, Timișoara) sau de la București (pentru Bacău, Suceava, Galați, Focșani, Iași, Ploiești, Buzău, Râmnicu Sărat, Craiova, Constanța, Călărași, Chișinău, Pitești, Cernăuți).

Kitul de recoltare este format din următoarele componente:

- 2 vacutainere, de 10 ml
- pungă marcată risc biologic
- pungă cu gel
- plic metalic
- 3 etichete cu cod de bare

Sunt necesare 2 vacutainere a câte 10 ml de sânge (din kitul furnizat).

Pentru recoltare se vor folosi ace 21G. Probele NU se vor recolta cu fluturas!

Dupa recoltare, probele se agită ușor de 10 ori.

Pe eticheta prelipită pe vacutainere se completează cu carioca Numele pacientei, Data de nastere, Data recoltării probelor.

NU se lipesc codurile de bare pe eticheta vacutainerului.

Vacutainerele se împachetează în punga marcată risc biologic, se plasează între cei 2 pereți ai pungii cu gel și se dispun în plicul metalic.

Se completează formularul în limba engleză cu toate informațiile solicitate.

Pe formular se lipește unul din cele 3 codurile de bare din kit. Restul de coduri, se lasă în cutia kitului de recoltare.

Punga metalică ce conține probele și formularul de solicitare se plasează în cutia kitului. Se trimite la București, în atenție departamentului de subcontractare, cu traseul intern.


În cazul în care este imperativă transmiterea coletului prin curier rapid, adresa către care se va trimite coletul este: București, sos. Giurgiului, nr. 46.

Probele se vor pastra OBLIGATORIU la temperatura camerei până la transport. NU refrigerati, NU congelați probele!

Prezentele instrucțiuni de recoltare/păstrare/transport probe sunt valabile atât pentru Testul Panorama cât și pentru Testul Panorama cu microdeleții.


Instructiuni de recoltare test PANORAMA

1 – RECOLTATI SANGELE DE LA MAMA

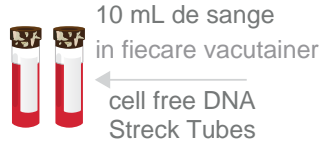

- Umpleti ambele tuburi complet. In cazul in care, volumul in unul dintre cele 2 vacutainere este insuficient recoltat, recoltati un vacutainer suplimentar.
- Acordati-le vacutainerelor 60-90 secunde pentru umplere completa.
- Utilizati ac 21G pentru recoltare. NU utilizati fluturas pentru recoltare.
- Colabatarea venei necesita o noua punctie venoasa. Utilizati pentru recoltare un nou vacutainer.

2 – AGITATI USOR PROBELE

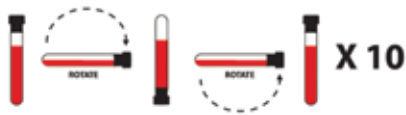


- Agitati usor, de 10x, fiecare vacutainer, imediat dupa recoltare pentru ca sangele sa se amestece omogen cu anticoagulantul.
- NU scuturati viguros vacutainerele!
- NU sigilati dopul vacutainerului cu parafilm sau banda adeziva.

3 – AMBALAREA PROBELOR



- A Completați eticheta de pe vacutainer.
- B Introduceți probele în punga marcată risc biologic.
- C Plasati probele între cei 2 pereti ai pungii cu gel.
- D Plasati punga cu gel în plicul metalic.

4 – COMPLETAREA FORMULARULUI

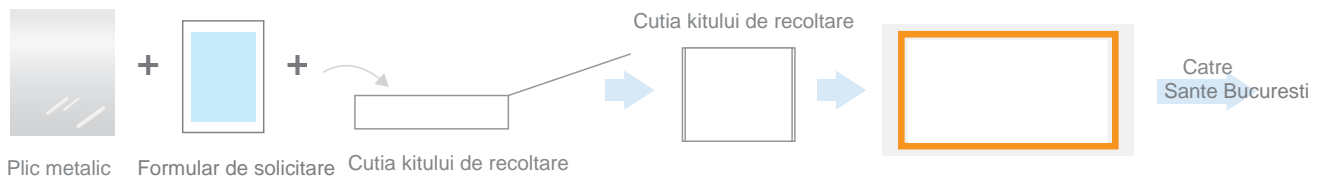

- A Plasati plicul metalic si formularul de solicitare completat in limba engleza in cutia kitului de recoltare
- B Probele se trimit la temperatura camerei catre Sante Bucuresti